

Monteringsanvisning

Eagle rullator (215175)



Så här monterar du din nya rullator



- 1.**
Avlägsna det röda gum-
mibandet som håller
ihop ramen (A). Fäll ut
ramen och tryck ned
sitsen tills det hörs ett
klick från säkerhetslåset
under sitsen.




- 2.**
Lägg ned ramen och
montera de två bakhju-
len (B1 + B2) på ramen
så att själva hjulet sitter
på ramens utsida. Fäst
genom att strama åt
handtaget.



- 3.**
Vänd ramen och monte-
ra framhjulen (C1 + C2).
Lyft upp hjulet, vrid 180
grader och tryck ned tills
det hörs ett litet klick.



- 4.**
Kläm fast käpphållaren
(D) på ramens vänstra
sida med ett lätt tryck.

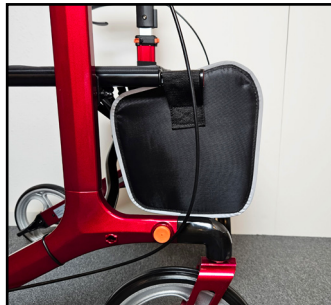

- 5.**
Placera väskan (E) fram-
till på rullatorn så att den
hänger i de två remmar-
na som sitter fast på
varsin sida av väskan.
Se foto för korrekt mon-
tering.



- 6.**
Fäst slutligen ryggstödet
(F) under handtagen
med hjälp av ett glidfä-
ste. Obs! Den polstrade
sidan av ryggstödet ska
vända in mot sitsen.