


Monteringsanvisning

Ibis rullator (215350)

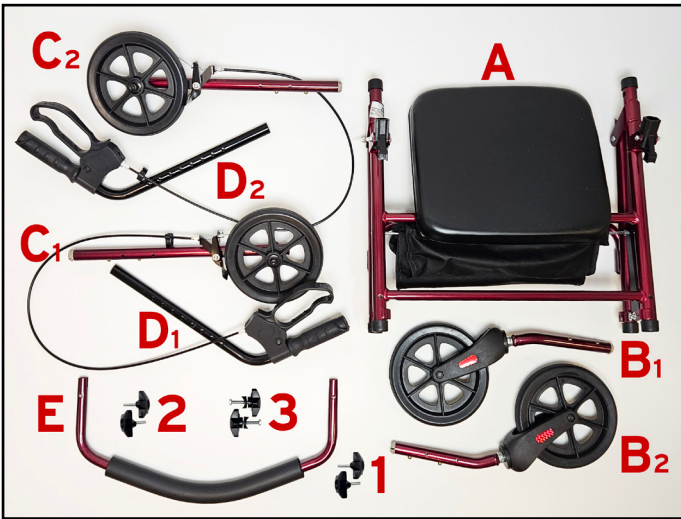

Så här monterar du din nya rullator



1.
Fäll ut ramen (A). Säkerställ att den tvärgående leden är helt nedtryckt.



2.
Lägg ned ramen och sätt in de två framhjulen (B1 + B2) i ramen, i önskad höjd – det finns två alternativ. Fäst med stjärngrepp (1).



3.
Vänd sedan på ramen och montera bakhjulen (C1 + C2) i samma höjd som framhjulen. Fäst med stjärngrepp (2).



4.
Ställ rullatorn på alla 4 hjul och montera båda handtagen (D1 + D2) i korrekt användarhöjd. Fäst med hjälp av beslag med stjärngrepp (3).



5.
Kläm fast plastklämman från bromsvajern på ramen så att vajern hålls på plats.



6.
Fäst slutligen ryggstödet (E) genom att föra in det i fästet med tiltfunktion, som sitter fast på ramen.

Rullatorn är nu färdigmonterad.